



Immer im Fokus

BABYTHERM

MT-752-2002

Optimale wärme



... zum Wohl Ihrer kleinen Patienten

Die neueste Generation der BabyTherm Säuglingswärmesysteme von Dräger Medical setzt neue Maßstäbe in der offenen Pflege. Sie schaffen nicht nur die ideale thermische Umgebung für Neugeborene, sondern zeichnen sich außerdem durch eine hervorragende Anwen- derzugänglichkeit aus, die eine optimale Versorgung Ihrer Patienten gewährleistet.

SMARTSWIVEL® FÜR FOKUSSIERTE WÄRME

Durch den standardmäßigen smartSWIVEL-Schwenkmechanismus der Versionen BabyTherm 8004 und 8010 bleibt das Baby immer automatisch im Fokus der Strahlungsheizung, selbst wenn der gesamte Wärmestrahler zur Seite geschwenkt wird. Folglich brauchen Sie sich beim Röntgen oder anderen Verfahren keine Sorgen mehr zu machen, dass Unterkühlung oder Kältestress eintritt, weil die Strahlungswärme jederzeit gleichmäßig verteilt wird.

GLEICHMÄßIGE WÄRMEVERTEILUNG

Die keramischen Heizelemente und goldbedampften Reflektoren des BabyTherm sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung auf der gesamten Liegefläche. Das Baby verspürt somit unabhängig von seiner Position auf der Liegefläche immer angenehme Wärme.

THERMOMONITORING™ FRÜHWARNSYSTEM

Messungen der zentralen und peripheren Temperatur (Zeh) geben frühzeitig einen Hinweis auf Temperaturinstabilität oder möglichen Kältestress. BabyTherm 8004 und 8010 bieten eine kontinuierliche Überwachung beider Temperaturen und machen es durch Beobachtung der Messwerte auf dem integrierten digitalen Display möglich, Kältestress bereits im Frühstadium zu erkennen. Die gemessenen Daten können auf Wunsch über eine RS 232-Schnittstelle an einen Patientenmonitor oder PC übertragen werden.

KOMFORTABLE BEHEIZTE GELMATRATZE

Die weiche und bequeme, aktiv beheizte Gelmatratze, die beim BabyTherm 8000* und 8010 zur Standardausstattung gehört, ist ein weiterer Pluspunkt in der Umgebung Ihres kleinen Patienten, da sie den thermischen Komfort erheblich verbessert. Mit der beheizten Gelmatratze können Sie die Wärmeleistung des Strahlers senken und dadurch insensible Wasserverluste reduzieren. Darüber hinaus wärmen unterkühlte Patienten durch die Kombination aus konduktiver Wärme von der beheizten Gelmatratze und radiativer Wärme-zufuhr von der Strahlungsheizung schnell auf.



D-1573-2009



MT-727-2002-23

Die auf dem selbsterklärenden Bedienfeldangezeigten Klartextmeldungen liefern Ihnen alle erforderlichen Informationen.



MT-1194-2004-1

Der komfortable Schrägstellmechanismus der Liegefläche kann zwischen +20° und -15° eingestellt werden.

Die Kombination aus konduktiver Wärme von der beheizten Gelmatratze und radiativer Wärmezufuhr von der Strahlungsheizung wärmt unterkühlte Babys schnell auf.

Optimum ergonomie

... für ungehinderten Zugang

Die ergonomische Gestaltung ist uns wichtig, damit Sie Ihre kleinen Patienten optimal versorgen können. Aus diesem Grund wurde die BabyTherm-Serie so konzipiert, dass ideale ergonomische Bedingungen gegeben sind. In der praktischen Umsetzung bedeutet dies optimale Zugänglichkeit und logische Anordnung aller Regler und Displays.

SMARTSWIVEL® SCHAFFT PLATZ

Der patentierte smartSWIVEL® Mechanismus beim BabyTherm 8004 und 8010 nützt nicht nur dem Säugling, sondern lässt Ihnen auch mehr Raum zum Arbeiten, ermöglicht ungehinderten Zugriff auf das Baby und schafft eine komfortable Arbeitsatmosphäre, bei der Sie nicht direkt unter dem Strahler arbeiten müssen und der Strahlungswärme nicht ausgesetzt sind.

ÜBERSICHTLICHES BEDIENFELD

Das direkt unter dem Heizstrahler befindliche Bedienfeld ist gut erreichbar und ermöglicht eine schnelle Veränderung der Einstellungen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Sie alle wichtigen Informationen auf dem großen, hellen Digitaldisplay von jeder Position am Wärmebett gut erkennen können.

ALLES IM BLICK

Die leuchtend rote zentrale Warnleuchte am Ende des Heizstrahlers macht Sie auf Alarmzustände aufmerksam, auch wenn Sie sich gerade mit einem anderen Patienten beschäftigen oder in einem anderen Bereich des Raumes arbeiten. Anschließend erhalten Sie in einer Klartextmeldung alle notwendigen Informationen.

BEDIENERFREUNDLICHKEIT

Wir sind bestrebt, für Sie optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen. Das zeigt sich anhand einer Reihe praktischer Funktionen. Die Höhe des BabyTherm lässt sich Ihrer Größe entsprechend einstellen, Schwenkschränke bieten zusätzlichen Platz zur Aufbewahrung von Zubehör, und alle beweglichen Teile oder Regelfunktionen sind leicht zu handhaben.


IM RICHTIGEN LICHT

Das beim BabyTherm 8004 und 8010 in das Strahlergehäuse integrierte Quarz-Halogen-Phototherapiesystem ermöglicht eine sofortige hochleistungsfähige Phototherapie, ohne dass Sie weiteren wertvollen Stellplatz benötigen.

Die Untersuchungslampe ist mit Einstellungen für Tages- und Nachtlicht ausgestattet. Zwei Helligkeitsstufen setzen Ihren Patienten jederzeit ins richtige Licht.



MT-1768-2003

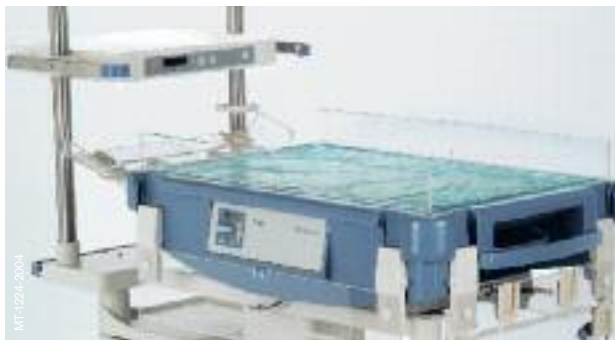

MT-1224-2004

Die BabyTherm Serie

Die BabyTherm Serie besteht aus drei Modellen: einem Säuglingswärmesystem mit Wärmestrahler (BabyTherm 8004), einem Säuglingswärmesystem mit Wärmestrahler und Matratzenheizung (BabyTherm 8010) und einem Wärmebett mit Matratzenheizung (BabyTherm 8000*). Egal, für welche Version von BabyTherm Sie sich entscheiden: Sie treffen immer die richtige Wahl zur optimalen Versorgung Ihrer kleinen Patienten.

Optimale optionen





MT-224-2004



MT-794-2002

Alle vier Seitenwände können mit einer Hand heruntergeklappt werden, damit Sie ungehinderten Zugriff haben. Sie haben die Wahl zwischen einer Wandhöhe von 15 cm oder 23 cm.

Die drehbaren Ablagen bieten jede Menge Stauraum.

BABYTHERM	8010	8004	8000*
STANDARDAUSSTATTUNG			
SmartSWIVEL® Schwenkmechanismus	•	•	
Manueller Betrieb	•	•	
Hauttemperaturregelung	•	•	
Tag - und Nachtlicht	•	•	
Zentralalarm	•	•	
ThermoMonitoring™	•	•	
Klartextmeldungen	•	•	
Schrägstellung der Liegefläche	•	•	•
Seiteninnenwände (7 cm)	•	•	•
Beheizte Gelmatratze	•		•
Röntgenschublade	•	•	
OPTIONEN			
Integrierte Phototherapie	•	•	
Höhenverstellung	•	•	•
RS232-Schnittstelle	•	•	
Zubehörablagen	•	•	•
Unabhängige Phototherapie			•

HAUPTSITZ

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

From September 2010:
Dräger Medical AG & Co. KG
changes into
Dräger Medical GmbH

DEUTSCHLAND

Dräger Medical Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tel +49 180 52 41 318*
Fax +49 451 88 27 20 02
dsc@draeger.com

* Inland: EUR 0,14/min

ÖSTERREICH

Dräger Medical Austria GmbH
Perfektastrasse 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04
Fax +43 1 699 38 01
info-austria@draeger.com

SCHWEIZ

Dräger Medical Schweiz AG
Waldeggstrasse 38
3097 Liebefeld-Bern
Tel +41 31 978 74 74
Fax +41 31 978 74 01
info.ch.md@draeger.com

Hersteller:

Dräger Medical AG & Co. KG
23542 Lübeck, Deutschland
Das Qualitätsmanagementsystem
der Dräger Medical AG & Co. KG
ist zertifiziert nach den Normen
ISO 13485, ISO 9001 und nach
Anhang II.3 der Richtlinie
93/42/EWG (Medizinprodukte).